


MANUAL DE INSTRUÇÕES

EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL VIA GRAVITY

Nome Técnico: EQUIPO DE IRRIGAÇÃO

PRODUTO ESTÉRIL

PROIBIDO REPROCESSAR

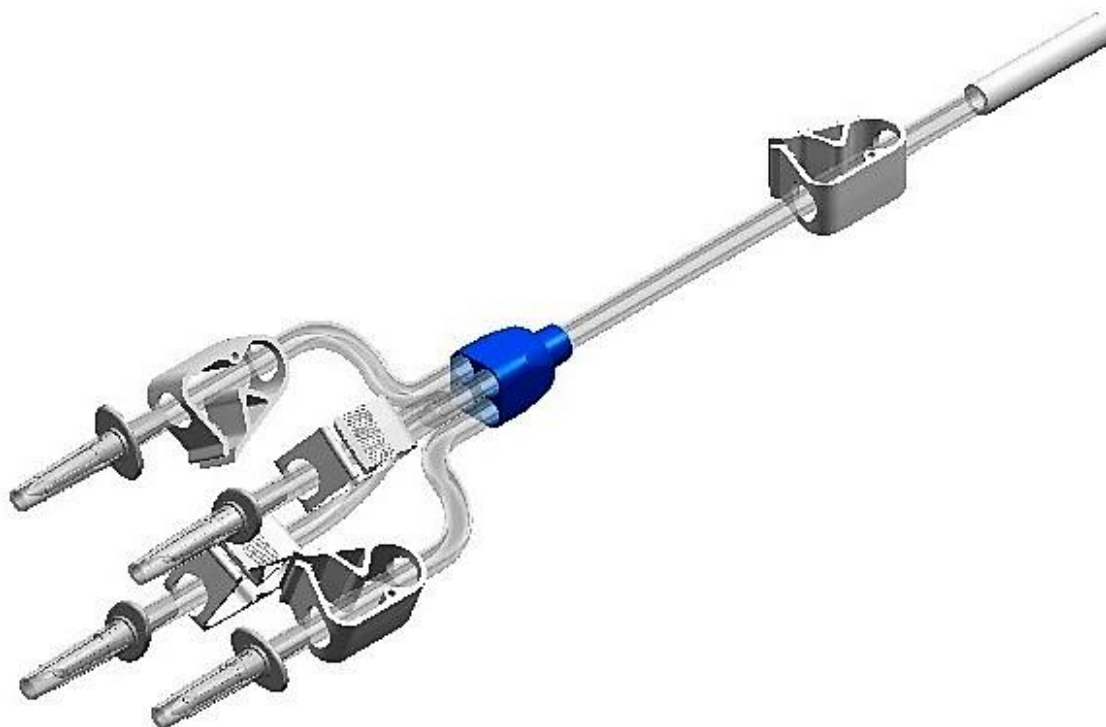


FINALIDADE

O **Equipo de Irrigação Gravitacional Via Gravity** é um dispositivo capaz de proporcionar a irrigação através da gravidade, com o objetivo de visualizar e facilitar a manipulação da instrumentação em procedimentos cirúrgicos.

O **Equipo de Irrigação Gravitacional Via Gravity** foi desenvolvido para ser utilizado por profissionais da área da saúde, que estejam familiarizados com instrumentos cirúrgicos. O Cirurgião é responsável pela aprendizagem das técnicas empregadas neste sistema. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

ITENS QUE COMPÕE O PRODUTO

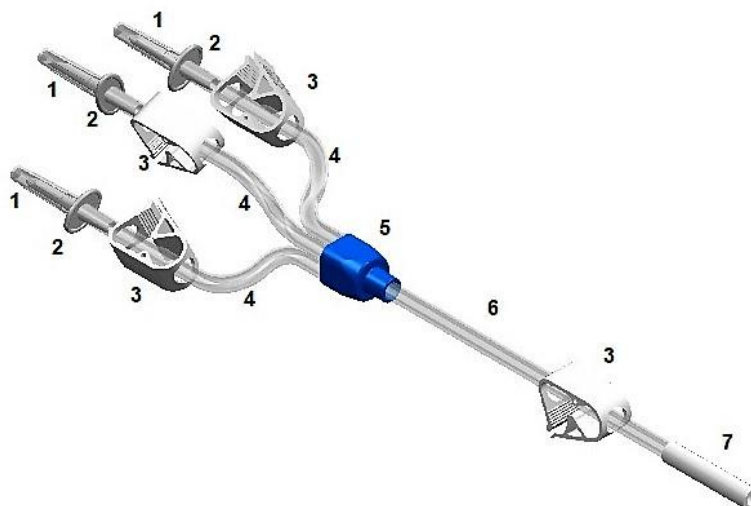

1 | Tampa do Conector para o Recipiente de Fluído;

2 | Conector para o Recipiente de Fluído;

3 | Presilha;

4 | Tubo de PVC Atóxico com 500mm de comprimento;

5 | Conector Y duas vias (Para Modelo 2 Vias);

5 | Conector 4 Vias (Para Modelo 3 e 4 Vias);

6 | Tubo PVC Atóxico com 2200mm de comprimento;

7 | Tubo de Silicone com 50mm de comprimento.

MODELOS

- **EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL VIA GRAVITY 2 VIAS (VM-01-02-01)**

Possui 2 Conectores para o Recipiente de Fluido.



- **EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL VIA GRAVITY 3 VIAS (VM-01-03-01)**

Possui 3 Conectores para o Recipiente de Fluido.



- **EQUIPO DE IRRIGAÇÃO GRAVITACIONAL VIA GRAVITY 4 VIAS (VM-01-04-01)**

Possui 4 Conectores para o Recipiente de Fluido.



INSTRUÇÕES DE USO

1. Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante;
2. Utilize técnica asséptica durante todo o procedimento;
3. Inserir o Conector para Recipiente de Fluido do equipo nos recipientes de fluído;
4. Fazer a circulação do fluído em todo o sistema a fim de retirar todo o ar;
5. Conectar a ponta com o Tubo de Silicone no instrumental de acesso;
6. Descartar o Equipo após a utilização. NÃO REUTILIZAR.

PRECAUÇÕES

- Verificar se a embalagem está íntegra e sem sinais de violação;
- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;
- Verificar se o encaixe do conector para fluído e do recipiente estão seguros e não apresentam vazamentos;
- A escolha do fluído de irrigação é determinada pelo profissional com base no método a ser empregado.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por Óxido de Etileno. A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

GARANTIA

O Equipo de Irrigação Gravitacional Via Gravity é um material de uso único, portanto não possui garantia.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

- Equipo de Irrigação Gravitacional Via Gravity 2 vias (VM-01-02-01)
- Equipo de Irrigação Gravitacional Via Gravity 3 vias (VM-01-03-01)
- Equipo de Irrigação Gravitacional Via Gravity 4 vias (VM-01-04-01)

Fabricante:

VIAMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

AV. CLEMENTE TALARICO, 860 – JD. EMBARÉ

CEP: 13563-882

CNPJ: 31.829.074/0001-69

Responsável técnico:

Ricardo Cyrino CREA-SP: 5069658977

Registro ANVISA nº:

São Carlos - SP