


MANUAL DE INSTRUÇÕES

EQUIPO PARA GERADOR ULTRASSONICO VIA MEDICAL

Nome Técnico: EQUIPOS

PRODUTO ESTÉRIL

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

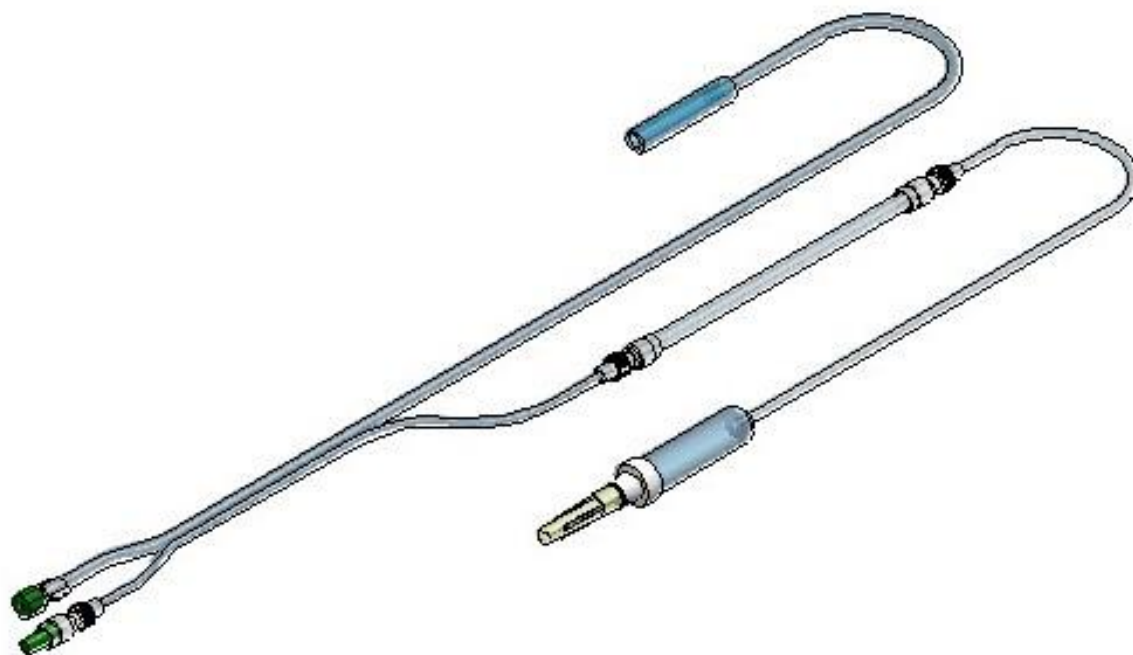


FINALIDADE

O Equipamento para Gerador Ultrassônico Via Medical é um dispositivo que, utilizado em conjunto com o equipamento gerador ultrassônico compatível, permite a irrigação de soro para limpeza de feridas.

O Equipamento é compatível com equipamentos bivolt, que possuem bomba peristáltica para tubo na medida de 6,70 mm externo.

ITENS QUE COMPÕE O PRODUTO

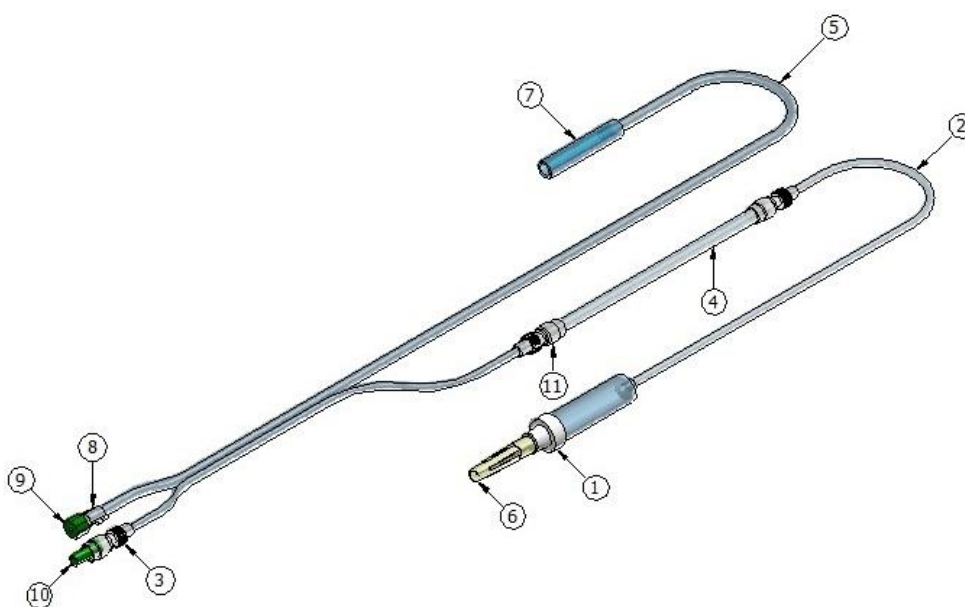

Item	Descrição	Matéria Prima
1	Perfurador de bolsa de soro	ABS
2	Tubo PVC atóxico	PVC
3	Conector Luer Lock Macho	PP
4	Peristáltica PVC atóxico	PVC
5	Tubo PVC atóxico	PVC
6	Tampa do perfurador de bolsa de soro	PP
7	Tubo PVC atóxico	PVC
8	Conector Luer Lock Fêmea	PP
9	Tampa Luer Fêmea	PP
10	Tampa Luer Macho	PP
11	Conector Peristáltica	ABS

MODELO

- **Equipo para Gerador Ultrassonico Via Medical**
Cód. VM-06-00-01

INSTRUÇÕES DE USO

1. Inspeção a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante;
2. Utilize técnica asséptica durante todo o procedimento;
3. Realize a montagem do equipo no equipamento de maneira correta;
4. Retire o ar do sistema acionando a irrigação em um recipiente;
5. Descartar o Equipo após a utilização. **NÃO REUTILIZAR.**

PRECAUÇÕES

- Verificar se a embalagem está íntegra e sem sinais de violação;
- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- O Equipo para Gerador Ultrassonico Via Medical deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O Equipo para Gerador Ultrassonico Via Medical segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar em local fresco, seco e distante de poeira.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por Óxido de Etileno. A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

GARANTIA

O Equipamento para Gerador Ultrassônico Via Medical é um material de uso único, portanto não possui garantia.

O Equipamento para Gerador Ultrassônico Via Medical é comercializado individualmente em embalagem primária e embalagem secundária. A embalagem primária é tipo envelope, manufaturado com papel Grau Cirúrgico e filme laminado de Poliéster/Polipropileno, que possibilita a abertura asséptica sem rasgos no filme e com menor liberação de fibras. A Embalagem secundária sendo caixa de papel cartão.

Fabricado Por:

VIAMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
AV. CLEMENTE TALARICO, 860 – JD. EMBARÉ
São Carlos/SP - CEP: 13563-882
CNPJ: 31.829.074/0001-69
Resp. Técnico: Ricardo Cyrino – CREA SP: 5069658977
Registro ANVISA nº: 81841289003