


MANUAL DE INSTRUÇÕES

FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRATE

Nome Técnico: ASPIRADOR CIRURGICO MANUAL

PRODUTO ESTÉRIL

PROIBIDO REPROCESSAR

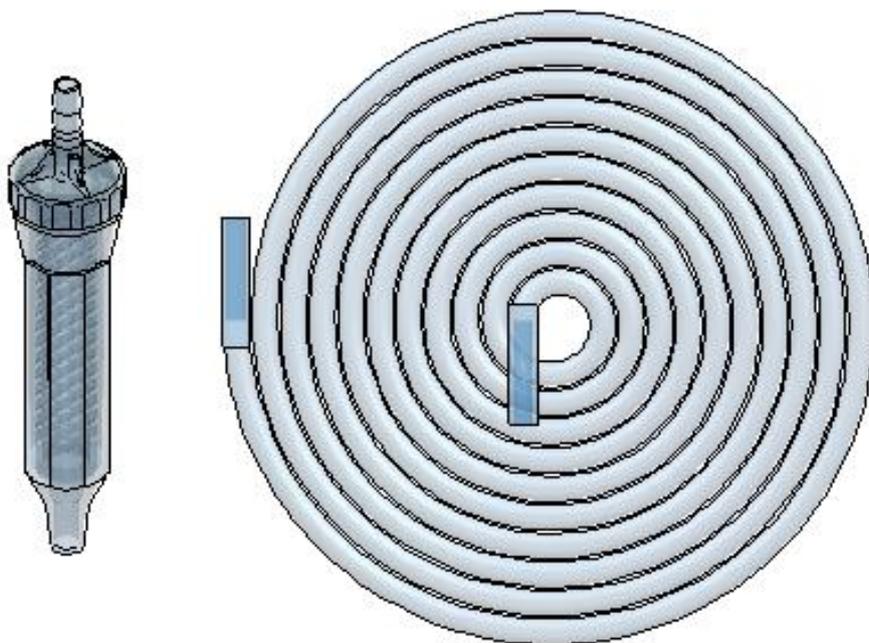

FINALIDADE


O **Filtro Aspirador ViaAspirate** é indicado para aspiração e sucção cirúrgica de todos os procedimentos cirúrgicos que gerem fluídos e fragmentos ósseos, grumos, gorduras e restos em geral, durante o procedimento cirúrgico.

O **Filtro Aspirador Via Aspirate** foi desenvolvido para ser utilizado exclusivamente por profissionais da área da saúde, que estejam familiarizados com instrumentos cirúrgicos. O Cirurgião é responsável pela aprendizagem das técnicas empregadas neste sistema. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A aspiração das secreções é feita através do sistema de vácuo, sendo que este não acompanha o produto.

ITENS QUE COMPÕE O PRODUTO

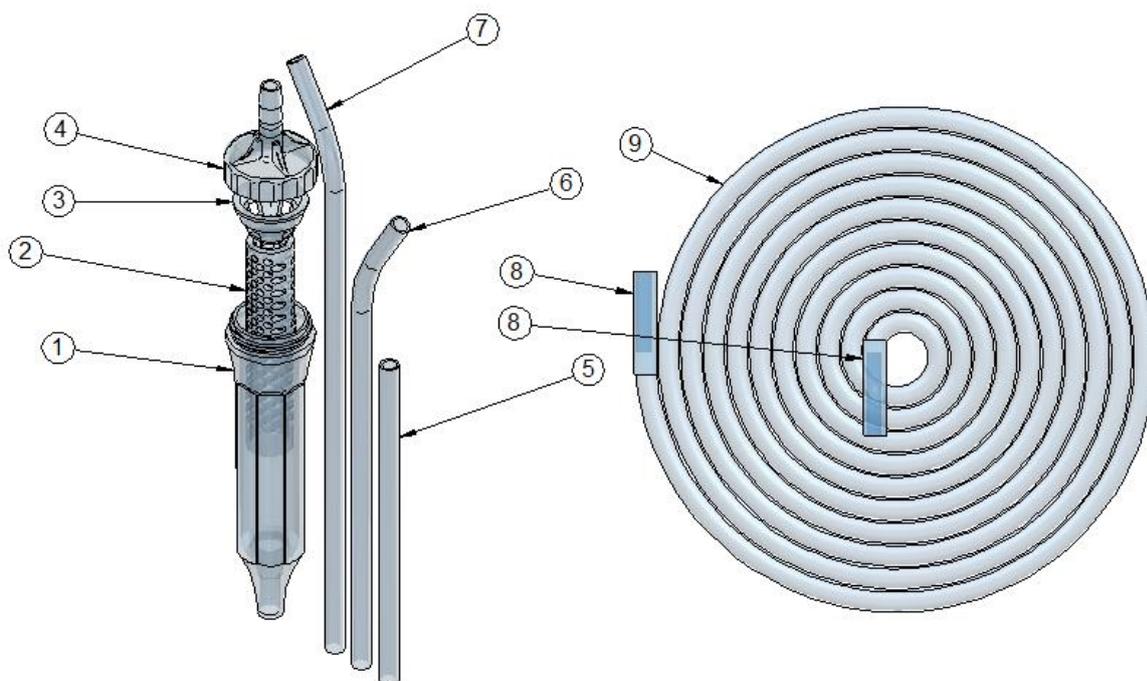

Item	Descrição	Matéria Prima
1	Copo Coletor;	ABS
2	Filtro de Aspiração;	ABS
3	Tampão Superior do Filtro;	ABS
4	Tampa com Rosca;	ABS
5	Ponta de Sucção Reta 8,0 x 150 mm;	PVC Atóxico
6	Ponta de Sucção Curva 8,0 x 220 mm;	PVC Atóxico
7	Ponta de Sucção Curva 8,0 x 270 mm;	PVC Atóxico
8	Tubo de silicone com 50 mm;	Silicone
9	Tubo Flexível 8,1 x 3000 mm;	PVC Atóxico

O produto acompanha 3 cânulas autônomas para aspiração, um filtro, um copo com tampa roscada e uma extensão flexível para ser possível a conexão com o sistema vácuo.

MODELOS

- Filtro Aspirador Via Asperate Micro(VM-03-01-01)
- Filtro Aspirador Via AsperateMedium (VM-03-02-01)

INSTRUÇÕES DE USO

1. Inspeção a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante;
2. Utilize técnica asséptica durante todo o procedimento;
3. Remover o Aspirador da embalagem e colocá-lo sobre ambiente asséptico / estéril;
4. Realizar a conexão do tubo flexível ao sistema vácuo e ao aspirador;
5. Ajustar a pressão do sistema vácuo conforme necessário;
6. Realizar a aspiração durante o procedimento;
7. Descartar o Extensor após a utilização. **NÃO REUTILIZAR.**

PRECAUÇÕES

- Verificar se a embalagem está íntegra e sem sinais de violação.
- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica.
- O produto é apirogênico e atóxico, não oferecendo em geral risco ao usuário.
- Não utilizar o produto caso sua embalagem original apresente sinais de violação ou data de validade expirada.
- Abrir e embalagem somente no momento do uso.
- Produto esterilizado por ETO. Esterilidade assegurada enquanto a embalagem não for violada.
- Produto de uso único – Descartar após o uso em local apropriado – Não Reutilizar ou Reesterilizar.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por Óxido de Etileno. A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

GARANTIA

O Filtro Aspirador Via Aspire é um material de uso único, portanto não possui garantia.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O Filtro Aspirador Via Aspire é comercializado em embalagem individual tipo envelope, manufaturado com papel grau cirúrgico e filme laminado de Poliéster/Polipropileno, que possibilita a abertura asséptica sem rasgos no filme e com menor liberação de fibras. O produto acompanha 3 cânulas autônomas para aspiração, um filtro, um copo e uma extensão flexível para ser possível a conexão com o sistema vácuo.

Fabricado e Distribuído por:
VIAMEDICAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 31.829.074/0001-69
AV. CLEMENTE TALARICO, 860 – JD. EMBARÉ
CEP: 13563-882
Responsável técnico:
Ricardo Cyrino CREA-SP: 5069658977
Registro ANVISA nº: 81841280003
São Carlos – SP