


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

**KIT CANULA PARA ATM VIA JAW**

**Nome Técnico: KIT INSTRUMENTAL**

**PRODUTO ESTÉRIL**

**FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**

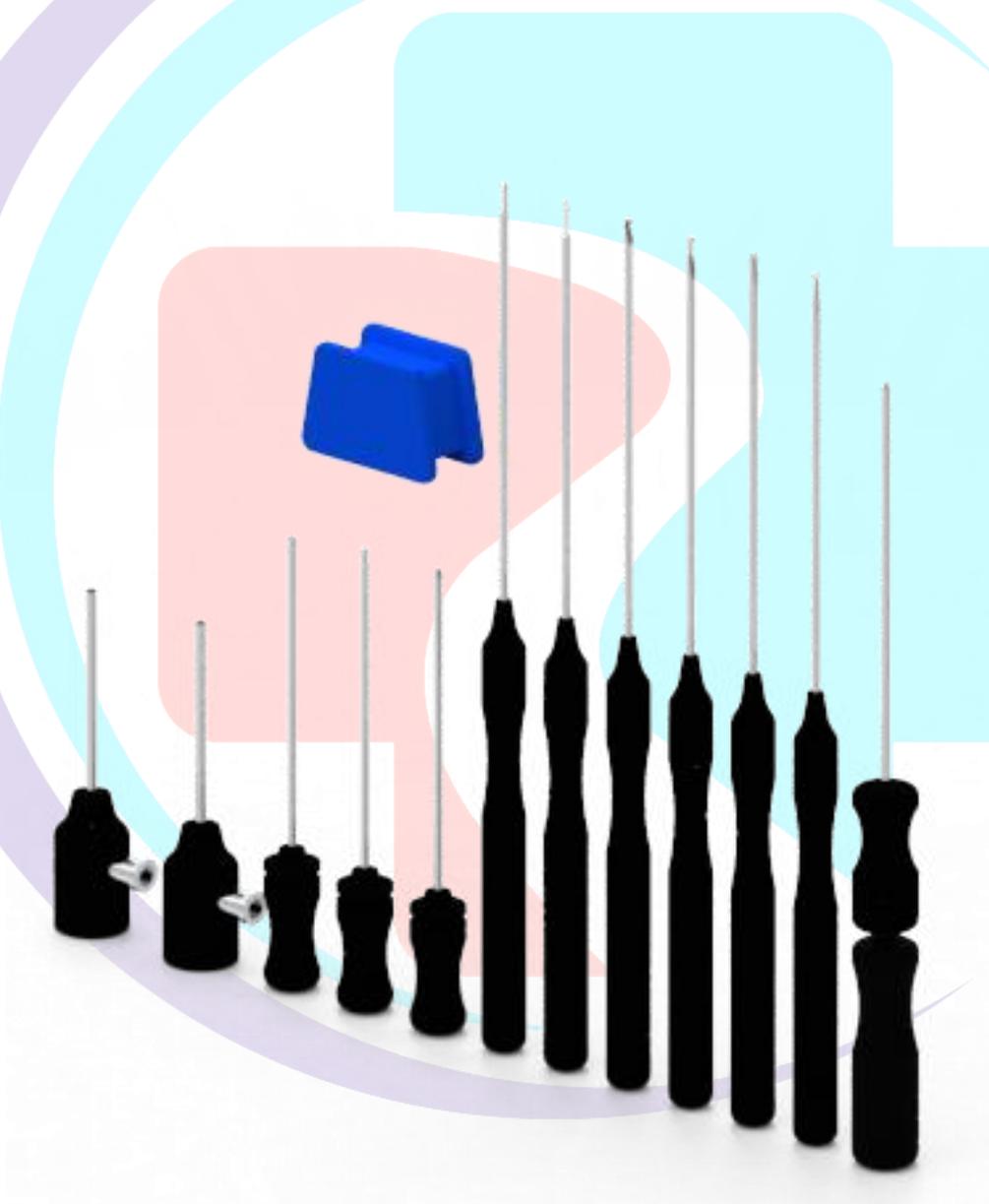

## **FINALIDADE**

O Kit Cânula Para ATM Via Jaw, fornece condições de utilização de um método minimamente invasivo para cirurgia de ATM. O Kit tem como função a criação de uma via de acesso ao interior das articulações, sem a necessidade de incisões de grande extensão, e através da cânula são inseridos os instrumentais quem tem como função a manipulação dos tecidos no interior da articulação. A sua utilização sempre levará em conta a técnica utilizada pelo cirurgião.

## **ITENS QUE COMPÕE O PRODUTO / MODELOS**

O Kit Cânula para ATM Via Jaw é composto de instrumentos que dependem das necessidades do profissional. Cada item foi desenvolvido para uma finalidade específica durante a cirurgia. O kit é composto pelos seguintes itens:

### **KIT CÂNULA PARA ATM VIA JAW-S**

- Cânula Guia da Agulha (2 unidades)
- Ponta Agulha Romba (1 unidade)
- Ponta Agulha Romba Ø1,50 (1 unidade)
- Ponta Agulha Punção (1 unidade)
- Ponta Agulha Meniscótomo (1 unidade)
- Ponta Agulha Cureta (1 unidade)
- Ponta Agulha Gancho 1 (1 unidade)
- Ponta Agulha Gancho 2 (1 unidade)
- Faca Unilateral (1 unidade)
- Faca Bifacetada (1 unidade)
- Pinça Grasper (1 unidade)
- Afastador de Boca Adulto (1 unidade)

### **KIT CÂNULA PARA ATM VIA JAW-M**

- Cãnula Guia da Agulha (2 unidades)
- Ponta Agulha Romba (1 unidade)
- Ponta Agulha Romba Ø1,50 (1 unidade)
- Ponta Agulha Punção (1 unidade)
- Ponta Agulha Meniscótomo (1 unidade)
- Ponta Agulha Cureta (1 unidade)
- Ponta Agulha Gancho 1 (1 unidade)
- Ponta Agulha Gancho 2 (1 unidade)
- Faca Unilateral (1 unidade)
- Faca Bifacetada (1 unidade)
- Pinça Grasper (1 unidade)
- Afastador de Boca Adulto (1 unidade)

### **KIT CÂNULA PARA ATM VIA JAW-L**

- Cãnula Guia da Agulha (2 unidades)
- Ponta Agulha Romba (1 unidade)
- Ponta Agulha Romba Ø1,50 (1 unidade)
- Ponta Agulha Punção (1 unidade)
- Ponta Agulha Meniscótomo (1 unidade)
- Ponta Agulha Cureta (1 unidade)
- Ponta Agulha Gancho 1 (1 unidade)
- Ponta Agulha Gancho 2 (1 unidade)
- Faca Unilateral (1 unidade)
- Faca Bifacetada (1 unidade)
- Pinça Grasper (1 unidade)
- Afastador de Boca Adulto (1 unidade)

## **MODO DE UTILIZAÇÃO**

Os itens do Kit Cântula para ATM Via Jaw devem ser selecionados e utilizados de acordo com a técnica cirúrgica adotada.

## **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

- Verificar se a embalagem está íntegra e sem sinais de violação;
- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;

## **TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO**

- O Kit Cântula para ATM Via Jaw deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O Kit Cântula para ATM Via Jaw segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar em local fresco, seco e distante de poeira.

## **ESTERILIZAÇÃO**

O produto é esterilizado por Óxido de Etileno. A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

## **GARANTIA**

O Kit Cântula para ATM Via Jaw é um material de uso único, portanto não possui garantia.

---

## FORMAS DE APRESENTAÇÃO

- Kit Cãnula para ATM Via Jaw-S (VM-08-01-01)
- Kit Cãnula para ATM Via Jaw-M (VM-08-02-01)
- Kit Cãnula para ATM Via Jaw-L (VM-08-03-01)

O Kit Cãnula para ATM Via Jaw é comercializado individualmente em embalagem primária, embalagem secundária e caixa individual. A embalagem primária é tipo blister PET virgem. A embalagem secundária é tipo envelope, manufaturado com papel Grau Cirúrgico e filme laminado de Poliéster/Polipropileno, que possibilita a abertura asséptica sem rasgos no filme e com menor liberação de fibras e caixa individual em papel cartão.

### **Fabricante**

VIAMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  
RUA SANTA GERTRUDES, 1189 – PARQUE SÃO JOSÉ  
CEP: 13570-800  
CNPJ: 31.829.074/0001-69

### **Responsável técnico**

Ricardo Cyrino CREA-SP: 5069658977

Registro ANVISA nº: 81841289006

São Carlos - SP