

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SPLINT NASAL VIA MEDICAL

Nome Técnico: MODELADOR NASAL

PRODUTO ESTÉRIL

PROIBIDO REPROCESSAR



Fabricante

VIAMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
RUA SANTA GERTRUDES, 1189 – PARQUE SÃO JOSÉ
CEP: 13570-800

CNPJ: 31.829.074/0001-69

Responsável técnico

Ricardo Cyrino CREA-SP: 5069658977

Registro ANVISA nº: 81841280005

São Carlos - SP

FINALIDADE

O Splint Nasal Via Medical, é uma tala flexível que possui um indicador de sutura para facilitar a realização da sutura evitando o deslocamento posterior. A sua utilização sempre levará em conta a técnica utilizada pelo cirurgião.

MODELOS

SPLINT NASAL VIA PIPE (VM-09-01-01)



SPLINT NASAL VIA FLAT (VM-09-02-01)



MODO DE UTILIZAÇÃO

A forma de uso é inerente à formação do profissional que irá realizar o procedimento. Não existe uma técnica cirúrgica específica para estes produtos indicada pelo fabricante, considerando que possam ser utilizados em vários tipos de procedimentos cirúrgicos. Para a utilização destes produtos, vale a escolha do cirurgião e de sua equipe pela melhor técnica, a depender da finalidade da cirurgia e do local desta.

O Splint Nasal Via Medical, para sua utilização, deve seguir:

1. Aplicar pomada antibiótica nas superfícies do Splint;
2. Dobrar o Splint com a auxílio dos dedos ou de uma pinça no sentido do comprimento;
3. Inserir o Splint dobrado na cavidade nasal;
4. Realizar a sutura para fixar o Splint na posição desejada.

Após o prazo determinado, realize a remoção do Splint:

1. Cortar a sutura;
2. Dobrar o Splint com o auxílio de uma pinça;
3. Remover o Splint.

O prazo para remoção do Splint deve ser determinado pelo cirurgião de acordo com o objetivo pelo qual foi utilizado. O prazo máximo recomendado pelo fabricante é de 10 dias.

Os critérios para a seleção do modelo são de extrema importância, porque estão diretamente ligados ao sucesso da cirurgia. Entretanto, a seleção do modelo a ser utilizado em cada paciente dependerá do diagnóstico e indicação médica.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Verificar se a embalagem está íntegra e sem sinais de violação;
- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- O Splint Nasal Via Medical deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O Splint Nasal Via Medical segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar em local fresco, seco e distante de poeira.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por Óxido de Etileno. A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

- Splint Nasal Via Pipe (VM-09-01-01)
- Splint Nasal Via Flat (VM-09-02-01)

O Splint Nasal Via Medical é comercializado em pares, em embalagem primária, embalagem secundária e caixa contendo 10 pares ou caixa contendo 5 pares. A embalagem primária é tipo blister PET virgem. A embalagem secundária é tipo envelope, manufaturado com papel Grau Cirúrgico e filme laminado de Poliéster/Polipropileno, que possibilita a abertura asséptica sem rasgos no filme e com menor liberação de fibras e caixa em papel cartão (pack com 10 pares e pack com 5 pares).